



녹 의: 제22 - 331호

2022년 07월 28일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 검사정보 변경

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Pyruvic acid (pyruvate) (GC Labs 코드: C506)	시약 및 장비 변경으로 인한 검사정보 변경	· 참고치(단위: mg/dL): 0.5~1.4 · 주의사항: 전용용기 채취 요망 - 제단백용액과 전혈 비율=2:1 (제단백용액 4.0 mL + 전혈 2.0 mL)	· 참고치(단위: mg/dL): 0.3~0.9 · 주의사항: 전용용기* 채취 요망 - 제단백용액과 전혈 비율= 1:1 (제단백용액 2.0 mL + 전혈 2.0 mL) 【적용일: 08월 08일 접수분】

* 기존 배포된 전용용기는 폐기하시고, 새로운 전용용기를 신청 후 사용하시기 바랍니다.
 (신규 전용용기(8% Perchloric acid)에는 제단백용액 2.0 mL이 담겨 있습니다.)

[검체 취급 방법]

검체 채취 즉시 전용용기(8% Perchloric acid)에 전혈을 1:1 비율로 넣고 15~60분간 충분히 반응시킨 후 원심분리하여 상층액 분리한다. 검체 채취 즉시 전용용기를 사용할 수 없는 경우 NaF tube (glucose 전용용기)에 채혈한 후 전용용기(8% Perchloric acid)에 전혈을 1:1 비율로 넣고 15~60분간 충분히 반응시킨 후 원심분리하여 상층액을 냉장 보관한다.

2. 수탁증지

검사항목	증지사유	적용일
SARS-CoV-2 Ab (Anti-S1 RBD) (GC Labs 코드: P820)	시약 공급 문제로 인한 수탁증지 ※ 대체검사: SARS-CoV-2 Ab (S1 RBD) (GC Labs 코드: W228)	07월 29일 접수분 (즉시 적용)

※ SARS-CoV-2 Ab (S1 RBD) (GC Labs 코드: W228)

- 검체: Serum 0.5 mL
- 보관: 냉장
- 검사방법: CMIA (chemiluminescence microparticle immunoassay)
- 참고치(단위: AU/mL): Negative: < 50
- 검사일/소요일: 월-토/1일(야간검사)
- 보험정보: 누654나/D654226C (199.61점)
- 검사수가: 18,000원

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]